

Портативный и легкий аппарат, работающий на батарейках. Имеет абсолютно безопасное для здоровья строение и подходит всем, независимо от возраста.

Отличительные особенности:

1. Не приносит вреда здоровью
2. Не имеет проводов
3. Значительно увеличивает звук

Преимущества усилителя звука:

- Способен увеличить звук до 40 децибел
- Не имеет никаких проводов
- Невероятно легкий - вес не более 10 грамм
- Вы сможете регулировать его мощность
- Безопасный – силиконовые мягкие вкладыши не повредят внутреннее ухо
- Имеется функция шумопонижения ANR-Auto
- Подходит для людей любого возраста
- В комплекте 3 батарейки и 3 съемных уплотнителя-вкладыша.



Способ применения

1. Вставьте в прибор одну батарейку 1.5 В. Откидная камера для батарейки открывается без особых усилий ногтем.
2. Аппарат оборудован выключателем питания. Позиция OFF обозначает «выключено», ON - «включено». Если аппарат не используется, выключатель должен быть в положении OFF . Это продлит срок службы батарейки.
3. Наденьте аппарат на ухо. Сам аппарат должен находиться сзади ушной раковины, а провод от него к силиконовой вкладке проходить сверху ушной раковины. Силиконовый ушной вкладыш должен быть плотно вставлен в ухо.
4. Отрегулируйте громкость. Предусмотрено 6 уровней контроля громкости помощью колесика на аппарате.

Рекомендуем начинать с минимального положения - 1 и плавно повышать до комфортного уровня.

Указания по технике безопасности

Внимание! При неправильном использовании (с чрезмерным усилением) аппарат может стать причиной длительного поражения слуха. Поэтому, обращайтесь, пожалуйста, к врачу аудиологу.

Берегите аппарат от сырости, влаги, перегревания и механических воздействий. Всегда снимайте аппарат в следующих случаях: во время приема душа/ванны, при использовании парфюмерных средств в аэрозолях, во время проведения мед. обследований, связанных с электромагнитным излучением (рентген, флюорография, томография).

В случае отказа слухового аппарата, проверьте Включен ли аппарат? Вставлена ли батарейка? Не разрядилась ли батарейка?

По мере использования батарейки, ухудшается слышимость, это значит, что батарейка разряжается, замените её новой. Плотно ли закрыт отсек для батарейки, и соблюдена ли полярность? Правильно ли установлен уровень громкости? Не закупорено ли отверстие ушного вкладыша серой?

Комплектность

- Усилитель звука
- Три индивидуальных ушных вкладышей разного размера
- Три батарейки 1,5 вольт типа LR13 или G13
- Футляр для хранения

Технические характеристики

- Длина внутренней части аппарата (которая прилегает к уху): 4 см.
- Диаметр маленького силиконового вкладыша: 8 мм.
- Диаметр среднего силиконового вкладыша: 10 мм.
- Диаметр большого силиконового вкладыша: 12 мм.
- Размер коробочки для хранения: 8x8x3 см.
- Размер упаковки: 8,5x17x2 см.
- Не имеет ограничений по возрасту